



### **INDICAÇÕES DE USO**

Pasta abrasiva para polimento de próteses.

### **CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Granulometria extremamente fina
- ✓ Elevada porosidade e permeabilidade
- ✓ Cor verde
- ✓ Alto rendimento.

### **INSTRUÇÃO DE USO**

Aplique com um dedo sobre a peça previamente lixada e alisada, em seguida com o auxílio de uma roda de flanela ou pano, realize o polimento da prótese no torno de bancada.

### **ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES**

- ✓ Conservar ao abrigo de calor.
- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.

### **EMBALAGEM**

Pote com 200g.

### **COMPOSIÇÃO**

Sílica Amorfa Hidratada, Óxido de Alumínio e Glicerina.

### **VALIDADE**

5 anos a partir da data de fabricação.

### **ANVISA Nº**

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291