



## INDICAÇÕES DE USO

Utilizado para o recobrimento de estruturas metálicas. (PPR's e protocolos).

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Já vem pronto para uso.
- ✓ Fotopolimerizável.

## INSTRUÇÃO DE USO

Agitar bem antes de usar.

A peça a ser recoberta deve estar sempre limpa, livre de gordura, poeira ou resíduos.

O metal pode ser pré-aquecido próximo à boca do forno.

Em seguida aplicar uma demão bem fina de OPACLEAN+, certificando-se que toda a área desejada esta recoberta pelo produto.

Em seguida Posicione a peça na unidade de foto polimerização de modo que a área revestida com OPACLEAN+ seja irradiada completamente.

Este tempo deve ser no mínimo de 5 minutos, em seguida verificar com o toque dos dedos se a secagem já atingiu um nível satisfatório.

Em caso de ambientes muito frios, prolongue o tempo de fotopolimerização.

## ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar a embalagem sempre fechada em local refrigerado ao abrigo de luz e calor (temperatura ideal sempre abaixo de 25°C).
- ✓ Caso tenha contato com os olhos lavar com água em abundância e procurar ajuda médica.
- ✓ Não aplicar nenhum material sobre a peça (resina/cera) enquanto não houver a secagem total.
- ✓ Não aplicar metacrilato de metila na forma líquida sobre a peça opacificada.
- ✓ Incompatível com álcool ou solventes.

## EMBALAGENS

Embalagem com 1 unidade de 10ml.

Disponível nas cores: Neutro, Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Escuro, Dentina 60, 62 e 66.





## COMPOSIÇÃO

Água / Corantes / Essência Artificial / Trimetilbenzoildi Fenilfosfineoxido

## ARMAZENAMENTO

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado

## VALIDADE

2 anos após data de fabricação.

## ANVISA Nº

81912539005

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira - CRO-IV: 04366291