



### INDICAÇÕES DE USO

Bastão para acabamento e polimento em prótese dentária acrílica.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Melhor resultado e agilidade no trabalho.
- ✓ Fórmula balanceada que não agride a escova de polimento.
- ✓ Produto único no mercado.
- ✓ Acabamento e Polimento à seco.
- ✓ Apresenta o brilho com pouquíssimo resíduo.
- ✓ Não adere as ameias da prótese.
- ✓ Diminui o risco da infecção cruzada.
- ✓ Facilita a limpeza do trabalho.



### INSTRUÇÃO DE USO

Após os processos de polimerização, resfriamento total e extração da prótese da Mufla, retirar os excessos de resina ainda existentes com broca tungstênio ou pedra abrasiva;

Com o objetivo de acabar com as imperfeições, utilize no mandril LIXA IMODONTO e deslize toda a superfície da prótese sobre a lixa;

Para acabamento e polimento, comece utilizando em motor tipo torno, com velocidade baixa.

Aplique o bastão IMOBRIIL BIVALENTE em uma roda de algodão ou flanela. Assim que houver aderência do produto na roda, passar a prótese na mesma até obter o resultado desejado.

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar ao abrigo de calor.
- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.

### APRESENTAÇÃO:

Bastão de 150g.

### COMPOSIÇÃO

Dióxido de Silício, Pigmentos e Ceras Artificiais

### ARMAZENAMENTO

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

### VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação.

### ANVISA Nº

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291