



PRODUTO

BINDER 28% E 40%

INDICAÇÕES DE USO

Binder é utilizado na composição de solução catalisadora para uso em revestimento refratário para fundição de modelos dentários em Prótese Parcial Removível (PPR)

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Melhora da resistência inicial e final
- ✓ Redução da quantidade de resina necessária
- ✓ Aumento da estabilidade de armazenamento da resina
- ✓ Eliminação de efeitos ambientais desagradáveis como a umidade.

EMBALAGENS

1000ml

COMPOSIÇÃO

- ✓ Silicato de Etila

INSTRUÇÃO DE USO

Em um recipiente misturar o Binder, e por último o reator, que deve ser despejado lentamente faça movimento constante com a mistura. Sacudir até esquentar.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar a embalagem sempre fechada em local fresco ao abrigo de luz e calor.
- ✓ Caso tenha contato com os olhos lavar com água em abundância e procurar ajuda médica.
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

REGISTRO DA ANVISA N°:

"Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973"

VALIDADE

1 ano após data de fabricação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291