



REMOVEDOR DE CERAS

PRODUTO

Removedor de Cera - REMOVE-C

INDICAÇÃO DE USO

O Remove - C é indicado para a remoção de resíduos de ceras e gorduras na confecção de próteses odontológicas e limpeza de gorduras e graxas em geral.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pode ser utilizado na técnica tradicional ou de micro-ondas
- ✓ Retira qualquer resíduo de cera, gorduras e graxas, colaborando para maior aderência do dente na base da prótese.
- ✓ Inodoro, não deixa qualquer tipo de resíduo.

EMBALAGENS

250ml e 500ml

COMPOSIÇÃO

HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS AROMÁTICOS

INSTRUÇÕES DE USO

Após a inclusão na Mufla e cura do gesso, deve-se retirar a cera, uma vez que os dentes já estão posicionados.

Para isso, aquecer a água num recipiente separado.

Mergulhar a Mufla por cerca de 5 minutos nesse recipiente e abrir para retirar a cera derretida. Lavar as superfícies internas da Mufla com mecha de algodão embebida em Remove-C, friccionando por toda a área, para retirar resíduos da cera. Esta operação de limpeza deve ser repetida, se necessário. Caso utilize a Mufla para micro-ondas, realizar o aquecimento no forno micro-ondas por 3 minutos em potência baixa. Para tirar os resíduos da cera, umedecer o algodão Remove-C, friccionando sobre a área a ser limpa. Para limpeza ainda mais completa, preencher a cavidade da Mufla com uma mecha de algodão seco; fechar a Mufla e em seguida, repetir a operação de aquecimento no forno de micro-ondas.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;
- ✓ Conservar ao abrigo da luz e calor;
- ✓ Produto inflamável e volátil;
- ✓ Manter o frasco fechado;
- ✓ Usar longe do fogo;
- ✓ Não aplicar em superfícies aquecidas;
- ✓ Manter fora do alcance das crianças;
- ✓ Evitar contato com a pele e com os olhos;
- ✓ Se causar irritações, lavar com água corrente;
- ✓ Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Provocar auxílio médico.



REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291